

Beschreibung für die Anbindung von smartLAB Waagen an Samsung S Health APP

Die Anbindung der smartLAB Waagen an die Samsung S Health App erfolgt nicht über Bluetooth® sondern über ANT+. Da ANT+ von den meisten Samsung und Sony mobilen Geräten unterstützt wird, können die smartLAB Waagen an die Samsung S Health App angebunden werden.

Um eine der smartLAB Waagen an die S Health App anzubinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1- Starten Sie die Samsung S Health APP.
- 2- Klicken Sie auf die Menü Taste Ihres Smartphones, um das Menü aufzurufen (Bild 1)

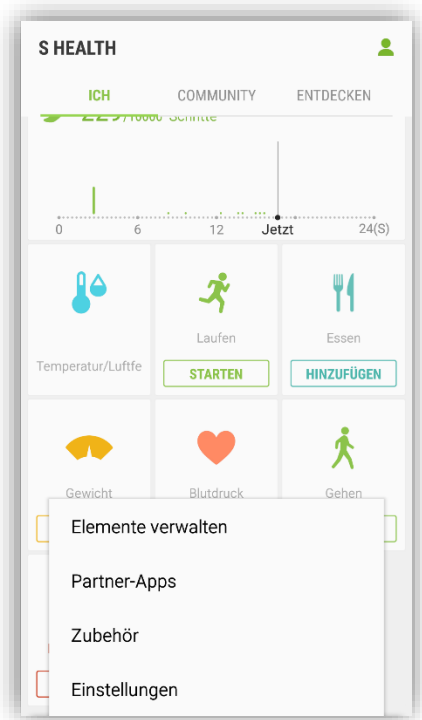


Bild 1

3- Nun klicken Sie auf Zubehör. Folgender Bildschirm erscheint:

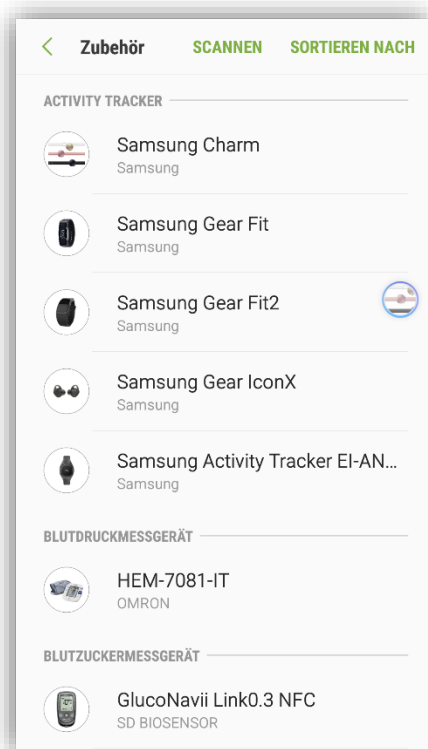


Bild 2

4- Tippen Sie auf Ihre smartLAB Waage, sodass diese eingeschaltet wird. Das „W“-Zeichen sollte nun zu blinken anfangen. Drücken Sie jetzt auf Scannen (Siehe Bild 2).

5- Die Waage wird erkannt und auf Ihrem Display angezeigt (Bild 3).

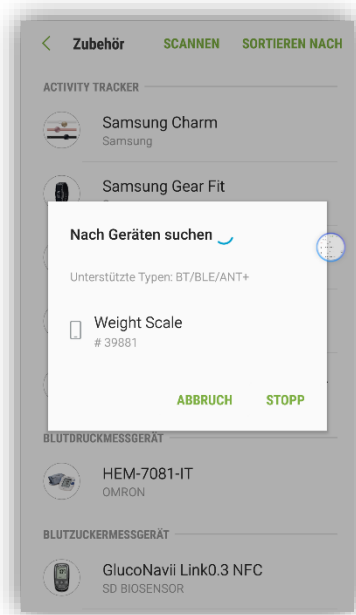


Bild 3

6- Wählen Sie die „Weight Scale“ aus. Nun ist Ihre smartLAB Waage unter registrierte Geräte eingetragen (Bild 4).

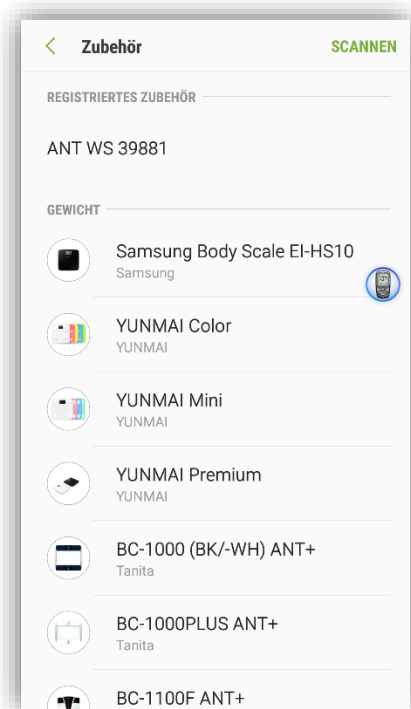


Bild 4

7- Gehen Sie nun im Hauptfenster auf die Gewichtsanzeige. Die App versucht sich nun mit der Waage zu verbinden. Wichtig ist, dass die Waage während des Kopplungsversuchs eingeschaltet ist. Die Waage wird als

Tanita Waage von der App erkannt.



Bild 5

- 8- Sobald Sie sich wiegen, verbindet sich die App automatisch mit der Waage.
- 9- Bitte beachten Sie, dass die S Health App gespeicherte Profildaten auf der smartLAB Waage löscht. Um das zu vermeiden, können Sie das neuste Software Update der Waage auf die smartLAB Waage aufspielen. Dies ist mit der smartLAB Flashtool App möglich. Der Ablauf des Updates wird in der App beschrieben. Die App finden Sie hier:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=info.hmm.bleflashtool>